

AESULAP Aicon® STERILCONTAINER

FUNKTIONSKONTROLL

Kontrollera alla komponenter i den sterila containern visuellt för skador och korrekt funktion, före varje användning. För att säkerställa en korrekt funktion måste bruksanvisningen TA015495-EN under alla omständigheter följas.


1. KONTROLLERA LOCKET



Kontrollera om det finns bucklor eller deformationer.



Kontrollera att packningen är intakt.

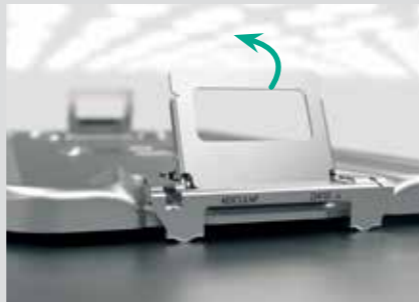

Kontrollera att låsmekanismen fungerar.


2. KONTROLLERA FILTERHÅLLAREN



Kontrollera om det finns bucklor eller deformationer.



Kontrollera att packningen är intakt.

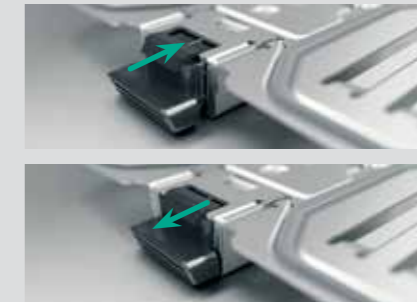

Kontrollera att filterhållarens tryckknappar fungerar.

3. KONTROLLERA CONTAINERBOTTEN



Sätt i ett nytt filter.



Filterhållaren snäpper hörbart in i position och har full kontakt med locket.



Kontrollera om det finns bucklor eller deformationer.



Kontrollera om det finns bucklor eller deformationer på containern



Ta bort EDS-ventilen för kontroll



Kontrollera så att EDS-ventilens är intakt. Sätt tillbaka EDS-ventilen.



Den blå prickn indikerar från utsidan att EDS-ventilen är korrekt isatt.



Stäng och plombera containern.. Skadade lock och containrar får EJ användas och ska skickas på service.



Steril container klar att användas.

5. STERIL CONTAINER KLAR ATT ANVÄNDAS

SE OCKSÅ SOM VIDEOKLIPP



Hur gör man funktionskontroll?
Skanna koden för att se korta videoklipp.