



## B. BRAUN ADHESIVE REMOVER

HJÄLPMEDEL FÖR ATT TA BORT  
STOMIPLATTA ELLER FÖRBAND

# B. BRAUN ADHESIVE REMOVER



## APPLICERING:

Spraya Adhesive remover på huden runt om stomiplatsen/förbandet. Vänta en stund för att låta Adhesive remover ha effekt. Fortsätt spraya samtidigt som du försiktigt lösgör stomiplatsen/förbandet från huden. Om förbandet fortfarande sitter fast, dra inte. Spraya istället mer Adhesive remover och vänta några sekunder innan du försöker avlägsna stomiplatsen/förbandet. Adhesive remover torkar snabbt och påverkar inte ny applicering/vidhäftning av ny stomiplatta eller annat förband.



## ÖVRIG INFORMATION:

**Fördelar tack vare unik ventilteknik:**

**Säker och ren:** Adhesive remover och drivmedelsgasen är separerade

**Praktiskt:** Kan användas i valfri position/vinkel och kan förvaras horisontellt utan läckage

**Miljöfördelar:** Innehåller kväve som drivmedelsgas

**Diskret:** Adhesive remover har en låg ljudnivå

**Lång hållbarhet:** 3 år, innehållet är vakuumpförpackat i fyra lager

**Ekonomiskt:** Inget inre avfall och kan användas tills behållaren är helt tom

## FÖRDELAR:

- Svider inte vid applicering
- Alkoholfri
- Skonsam mot huden
- Hjälper till att ta bort häftrester och minimerar påverkan på huden

## INNEHÅLL

100 % silikon

## ANVÄNDNINGSMRÅDE:

För snabbt, enkelt och smärtfritt borttagande av stomiplatta och häftrester på huden.

## AVFALLSHANtering:

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.



## BESTÄLLNINGSMATION:

Produktnamn	Volym	Antal	B. Brauns artnr	Varunr*
Adhesive remover spray	50 ml	1 st	2005-1	73 39 02

Avdfp: 1 st Transportfp: 24 st

\*Artikeln ingår i stomiförmånen

Tillverkas av: Aurena Laboratories AB | Fjärrviksvägen 22 | 653 50 KARLSTAD

B. Braun Medical AB | Box 110, 182 12 DANDERYD | Besöksadress: Svärdvägen 21, 182 33 DANDERYD  
Telefon: 08-634 34 00 | Hemsida: www.bbraun.se | E-mail: info.sverige@bbraun.com

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos mentioned herein are the exclusive property of B. Braun. Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an infringement of the intellectual property rights of B. Braun. Non binding documents and photographs.