

Askina® Barriärfilm

Varaktigt hudskydd för sårvård och stomi

Beställningsinformation

B. Brauns artnr	Beskrivning	Antal	Varunnr
4002801	Spray, 28 ml	1 st	73 39 00
4000125	Foam swab, 1 ml	25 st	73 39 01

Askina® Barriärfilm

Varaktigt hudskydd för sårvård och stomi



Hudbarriär som andas, torkar snabbt och inte svider

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB,

Box 110, 182 12 DANDERYD

Tel: 08-634 34 00 Fax: 08-634 34 34

Hemsida: www.bbraun.se E-mail: info.sverige@bbraun.com

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Askina® Barriärfilm

Svider inte, snabbtorkande hudbarriär som andas

När skall du använda Askina® Barriärfilm?



- 1) **FÖREBYGGA** skador på huden orsakat av **FRIKTION** eller **FUKT**
 - Skydd för känsliga områden: hälar, armbågar, tår, höfter –från det första tecknet av rodnad som orsakats av friktion.
 - Skyddar inkontinenta patienters hud.
- 2) **SKYDDA** huden mot **MACERATION**
 - Sårkanter.
 - Peristomal hud.
 - Skydda huden runt om dränagetuber och externa katetrar.
- 3) **SKYDDA** nyläkt hud och förhindra ytter liggare nedbrytning



Skin at risk: incontinent patient



Incontinence dermatitis with skin breakdown




Peri-wound skin maceration



Tube insertion site

Enkel, ekonomisk och säker att använda

- Svider ej, kan användas på skadad hud.
- Torkar snabbt < 30s.
- Transparent: möjliggör visuell kontroll.
- Kostnadseffektiv: tre dagars skydd.
- Lätt att avlägsna.
- Förbättrar vidhäftningen av förband och fixeringstejp.
- Minskar inte effektiviteten på inkontinenta kuddar.
- Minskar inte fästförmågan hos stomiprodukter.

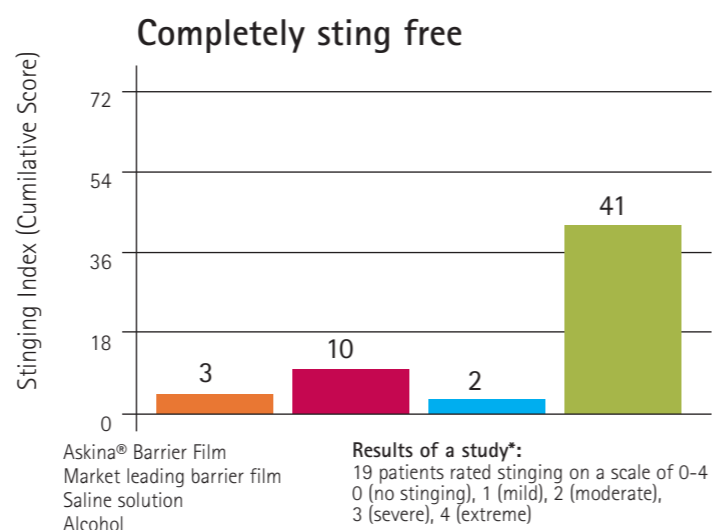

* Data on file

Hur skall du använda Askina® Barriärfilm?

- 1) **Förberedelse** av huden
 - Rengör huden med lämplig rengöringsvätska och torka noggrant.
- 2) **Applicering**
 - Håll spraymunstycket 10-15 cm från huden, tryck ner spraymunstycket och applicera barriärfilmen över det tilltänkta området.
 - Filmen torkar på mindre än 30 sekunder.
- 3) **Borttagning**
 - Om nödvändigt, kan tas bort med medicinsk remover.



Fördelar inom stomivård

Significant irritation of peristomal skin at day 1.



Day 1

Signs of irritation have been almost entirely resolved at day 15.




Day 15

After 15 days of use of Askina® Barrier Film, a net improvement of the peristomal skin is noticed.

Patienters fördel vid stomi
Mindre smärta vid
byte av påse

User opinion on skin protection efficacy¹

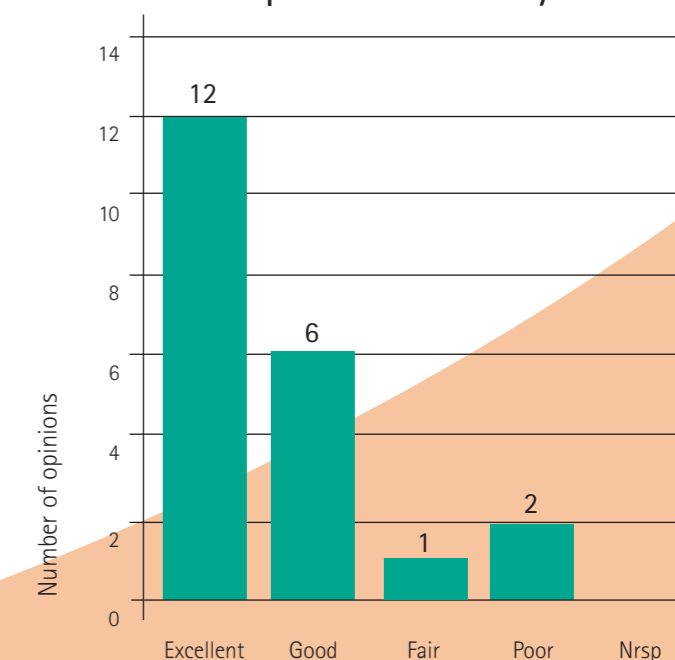

¹ 21 patients took part in the survey*

In summary, 18 out of 21 patients rated the product as "Excellent" or "Good".