



YT-  
DESINFEKTION



# Förbättra ytdesinfektionen

ÖKAR TILLFÖRLITLIGHETEN AV RENGÖRING OCH DESINFEKTION

# B. Braun SurfaceCheck UV

Rengöring av ytor är fundamental för infektionsprevention inom hälso-sjukvården. Kontaminerade ytor har stor påverkan för spridningen av farliga patogener, med antibiotikaresistenta organismer inkluderat. Därför är de fem momenten för desinfektion runt patienten samt ytor och utrustning som patienter och vårdpersonal tar på nödvändiga för att minska exponeringen.

Sjukvårdspersonal och lokalvårdare möter stora utmaningar när patogener som är kapabla att överleva under en längre tid på en yta, riskerar att bli fripassagerare på personer och överförs till nya rum och infektera patienter.

Effektiva metoder måste därför implementeras för att bedöma effektiviteten av reningen och ytdesinfektion av ytor inom sjukvården för att minska risken för vårdrelaterade infektioner.

## ÖKA KUNSKAPEN

Med större oro för att ytor i rum inte blivit tillräckligt och korrekt desinficerade behövs verktyg för att få till en bättre tillförlitlighet.


Visuell inspektion är den enklaste metoden för att undersöka desinficeringen, vilket ger en hint om vilka ytor som blivit rengjorda och vilka som inte blivit det. En teknik som kan användas är att använda en osynlig flouricerande markering. Markeringen placeras på vanliga tagställen i ett rum innan rengöring med efterföljande UV-ljus inspektion efter desinficering. Det skapar en direkt och omedelbar feedback till personalen som rengör ytorna.

B.Braun erbjuder en enkel metod som är lätt att använda med ett individuellt märkningssystem: skriv ett datum, tid och signatur på ytan. Detta förenklar och gör det lätt att följa upp decificeringen och hur rengöringen efterlevs. Pennan kan fyllas på med Fluo Add (flouricerande lösning kan även tillsättas i handdesinfektion för att kontrollera handhygien vid teknikträning för handhygien).


Source: <https://effectivehealthcare.ahrq.gov/topics/healthcare-infections/research-protocol> Accessed (18 Jan 2018)

B. Braun Medical AB | Box 110 | 182 12 Danderyd  
Telefon +46 8 634 34 00 | [info.sverige@bbraun.com](mailto:info.sverige@bbraun.com) | [www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)


## INSTRUKTIONER

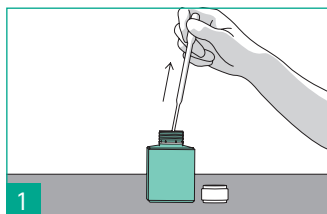


1 Använd pipett för att dra upp Fluo-Add lösningen.

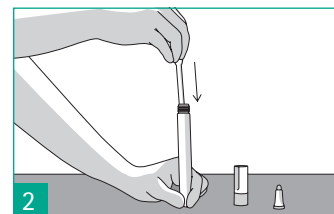

2 Öppna pennan och fyll den med lösningen.

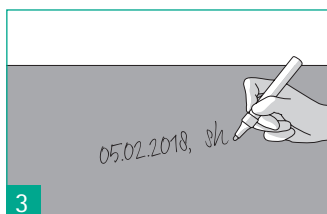

3 Märk ytan med datum eller annat som kan följas upp.

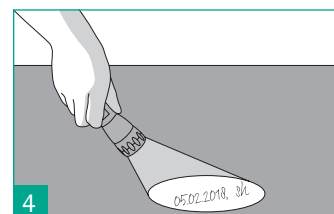

4 Lys efter desinficering med UV-lampan för att se om ytan är ren.



## PRODUKTER

## REF

B. Braun SurfaceCheck UV  
Inkluderar en påfyllbar markeringspenna, UV-ljus i ficklampa modell.  
Pipett

3908476

Fluo-Add 100 ml

180127