



- Mikrofiberteknologi
- Snabb och mjuk debridering
- Bidrar till ren sårbädd och hud runt omkring
- Rengör såret från beläggning och döda cellrester
- Absorberar överflödigt sårexudat
- Skonsam mot intakt och frisk hud

Prontosan® Debridement Pad

MJUK MEKANISK AVLÄGSNING AV SÅRBELÄGGNING

Prontosan® Debridement Pad

MJUK MEKANISK AVLÄGSNING AV SÅRBEÄGGNING

PRODUKTBESKRIVNING


Prontosan® Debridement Pad är utformad för att stötta rengöringen av sårbedden med Prontosan® sårspollösning. Debrideringsdynan består av ett främre lager av mikrofiber, som debriderar, och ett absorberande bakre lager för snabb, effektiv och säker debridering. Prontosan® Debridement Pad rengör såret från sårbeläggning och döda cellrester och absorberar överflödigt exudat och orenheter. Intakt hud bevaras. Prontosan® Debridement Pad ger goda resultat även vid fibrinbeläggning och nekrotisk vävnad, om såret på förhand behandlats autolytiskt.

Prontosan® Debridement Pad är endast för engångsbruk.

HUR FUNGERAR MIKROFIBER?


Mikrofiber kan fästa sig även till de minsta mikroskopiska partiklarna – partiklar som vanlig monofilamentfiber förbigår. Om det vore synligt, skulle man se en bindning mellan mikrofibererna och partiklarna.

En debrideringsdyna består av miljoner mikrofiber, vilket innebär att den bindande effekten dramatiskt förhöjs. Därför kan fiber-materialet dra till sig cellrester, sårsekret och orenheter.

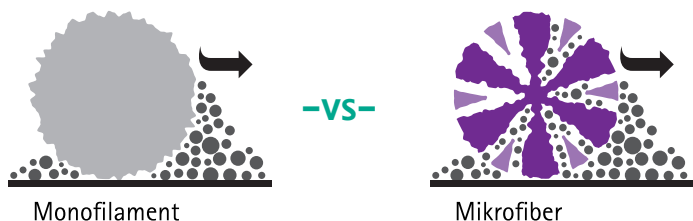

BRUKSANVISNING

Fukta den mjuka omärkta sidan av dynan med 15 - 20 ml Prontosan® sårspollösning*. Följ eventuella lokala riktlinjer. Tryck lätt och rensa såret och/eller omkringliggande hud i cirkulära rörelser med den mjuka fuktiga sidan.

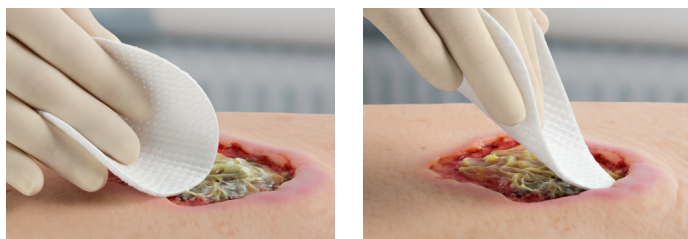

Efter debridering rekommenderas att spola såret grundligt med Prontosan® sårspollösning och sedan fortsätta med relevant sårbehandling.

Förpackningsstorlekar	Artikelnummer
Fp om 3 debrideringsdynor	3908456
Fp om 10 debrideringsdynor	3908457

Sammansättning

Debrideringsdynan består av polyester och polypropylen mikrofiber med ett stöttande lager av polypropylen på baksidan.

EGENSKAPER

- Mikrofiberteknologin möjliggör god rengöring & debridering
- Mjuk debridering, ingen vävnadsirritation
- Unik droppform, vilket gör det möjligt att debridera kaviteter och svåråtkomliga områden
- Blisterförpackning för säker och aseptisk fuktning av debrideringsdynan före användning

* Om Prontosan® sårspollösning inte finns tillgängligt kan debrideringsdynan fuktas med fysiologiskt natriumklorid